



Hemo-Fec[®] test

For påvisning av okkult blod i fæces

Brukerveiledning for laboratoriet

Produktoversikt Hemo-Fec[®]

MK101

Hemo-Fec[®] Reagens A+B, 200 tester

Diagnostisk test til fæces for påvisning av occulte blødninger i hele gastrointestinaltractus. MK101 Hemo-Fec test A+B består av 1 dråpeflaske reagens A (8.0 ml reagens, grønn etikett) og 1 dråpeflaske reagens B (10.0 ml reagens, rød etikett) i praktisk eske påtrykket bruksanvisning. Til 200 enkeltprøver. Reagensene benyttes i kombinasjon med prøvetakingssett som består av konvolutter, prøveplater og spatler (MK120) Reagensene er stabile og holdbare i 2 år fra produksjonsdato ved oppbevaring i kjøleskap.

MK120

Hemo-Fec[®] Slides, 100 stk

Prøveplater til fæcesprøver. Til påvisning av occulte blødninger i hele gastrointestinaltractus. Hver plate kan brukes til 3 enkeltprøver. Leveres komplett med konvolutter og spatler. Brukes sammen med MK101 (reagens A og reagens B). Pakningsstørrelse: 100 i eske

MK360

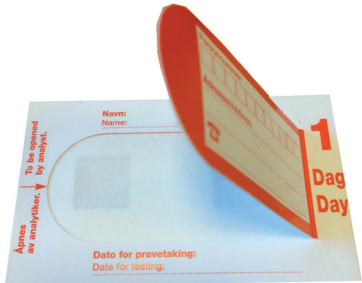
Hemo-Fec[®] Komplett, 50 tester

Diagnostisk test til fæces for påvisning av occulte blødninger i hele gastrointestinaltractus. MK360 Hemo-Fec test A+B består av 1 dråpeflaske reagens A (grønn etikett) og 1 dråpeflaske reagens B (rød etikett) i praktisk eske påtrykket bruksanvisning. Til 50 prøver. Reagensene benyttes i kombinasjon med vedlagte prøvetakingssett som består av konvolutter, prøveplater og spatler. Reagensene er stabile og holdbare i 2 år fra produksjonsdato ved oppbevaring i kjøleskap.



Hemo-Fec[®] Test

Brukerveiledning for laboratoriet

1	Åpne klaffen på sliden som vist på bildet	
2	Drypp 1 dråpe reagens A (grønn etikett) på hvert av testfeltene. uten å berøre sliden. Flasken bør holdes loddrett.	
3	Drypp 1 dråpe reagens B (rød etikett) på de to samme feltene uten å berøre sliden. Flasken bør holdes loddrett.	
4	Testen leses av innen 10 sekunder. Dersom testen er positiv for blod i avføringen, vil man se en blå-grønn farge på de to testfeltene. Fargeomslag etter 10 sekunder skal tolkes som negativt resultat. Den øverste sliden på bildet til høyre viser en negativ prøve. Den Nederste sliden på bildet til høyre viser en positiv prøve. Fargene på positiv prøve kan variere.	

Hemo-Fec[®] Test

Oppbevaring og Kvalitetskontroll av Hemo-Fec[®] reagens

Kontroller reagensenes utløpsdato.

Reagensene skal oppbevares i kjøleskap og unngå sollys i størst mulig grad. Ved riktig oppbevaring vil Hemo-Fec[®] reagensene ha 2 års holdbarhet fra produksjonsdato. Holdbarheten er angitt på reagens flaskene.

Dersom reagensene har blitt oppbevart i korte perioder (mindre enn 1 uke) utenfor kjøleskap har dette som regel ingen betydning. Vi anbefaler likevel at det utføres kvalitetskontroll av reagensen dersom dette har forekommet.

Dersom **reagens A(grønn etikett)** har blitt utsatt for lys eller varme over lengre tid kan reagensen ha fått blitt uklar, mørk brun farge. Dette har ingen praktisk betydning for resultatet av testen så lenge den er innenfor holdbarheten på flasken.

Kvalitetskontroll av Hemo-Fec[®] reagens:

Negativ kontroll:

Utstyr: Fysiologisk saltvann (evt. rensset sterilt vann)

1. Drypp en dråpe fysiologisk saltvann på hvert testfelt på sliden (felt A og B). Lim igjen sliden.
2. Snu sliden og åpen klaffen (som vist i brukerveiledningen)
3. Drypp 1 dråpe **reagens A(grønn etikett)** på hvert av testfeltene. uten å berøre sliden. Flasken bør holdes loddrett.
4. Drypp 1 dråpe **reagens B(rød etikett)** på de to samme feltene uten å berøre sliden. Flasken bør holdes loddrett.
5. Det skal ikke forekomme noe fargeomslag i løpet av 30 sekunder.

Positiv kontroll:

Utstyr: 10µl blod, 2 ml fysiologisk saltvann (evt. rensset sterilt vann)

1. Bland blodet i det fysiologiske saltvannet.
2. Drypp en dråpe av saltvann/blod blandingen på hvert testfelt på sliden (felt A og B). Lim igjen sliden.
3. Snu sliden og åpen klaffen (som vist i brukerveiledningen)
4. Drypp 1 dråpe **reagens A(grønn etikett)** på hvert av testfeltene. uten å berøre sliden. Flasken bør holdes loddrett.
5. Drypp 1 dråpe **reagens B(rød etikett)** på de to samme feltene uten å berøre sliden. Flasken bør holdes loddrett.
6. Fargeomslag skal skje umiddelbart (maks 10 sekunder).'

Dersom resultatet av den Negative og positive kontrollen er OK, kan reagensene benyttes.

Hemo-Fec[®] Test

Pasientveiledning Hemo-Fec[®]

For at testresultatet skal bli riktigst mulig er det viktig at pasienten følger bruksanvisningen nøye.

4 døgn før prøven tas og i prøvetiden:

Unngå:

Rødt kjøtt, blodmat, lever, nyrer, fisk med mørkt kjøtt (laks, tunfisk, makrell og sardiner), blomkål, pepperrot, rå tomater, reddiker, melon, bananer og soyabønner.

Unngå alkohol i prøvetiden.

Innta ikke:

Kortisonpreparater, Acetylsalicylsyre (eks. Dispril og Globoid), jernpreparater og C-vitamintabletter.

Rådfør med legen dersom andre legemidler benyttes.

Kun moderate mengder av:

- Ukokt frukt og grønnsaker
- Kokt kjøttpålegg
- Melkeprodukter

Anbefalt kost:

- Fiberrik kost til måltidene er viktig. f.eks. grovt brød
- Svinekjøtt og fjærkre
- Fisk med hvitt kjøtt. f.eks. torsk, sei.
- Kokte grønnsaker.

Relaterte produkter



Kvarts tidsur multifunksjon.

6-sifret LCD display med festeclips og magnet.

Leveres med batteri.

- Klokkefunksjon
- Stoppeklokke og nedtelling med alarm
- 23 timer 59 min og 59 sek.

Varenummer: H1977/2



Kvarts tidsur, hvit

Digital timer for nedtelling.

Magnetfeste.

Leveres med batteri

- 99 min og 59 sek.
- Alarm

Varenummer: H1977

Universalcontainer

Med-Kjemi sine universalcontainere har lekkasjefrie, vatterte skrulokk og konisk bunn. De finnes også med tilsatt borsyre for urinpreservasjon og med skje i lokket for fecal-prøveoppsamling. Produktene er CE merket i henhold til EU D98/79/EC.

Varenummer: UNI0039D

Universalcontainer i polypropylene(PP), 30 ml med etikett og skje

Leveres i kartonger á 400 stk (8 poser á 50 stk).

Diameter med lokk: 30,5 mm

Høyde med lokk : 92,3 mm



Relaterte produkter



Med-Kjemi ønsker å gjøre det enklest mulig for både pasienter og helsepersonell. Derfor introduserer vi nå Fe-Col®-prøveoppsamler.

Et hygienisk og enkelt hjelpe middel for å samle prøvemateriale til Hemo-Fec testen. Fe-Col® er 100% nedbrytbar, tetter ikke toalett og avløp.

Fe-Col® er selvforklarende og intuitivt å bruke.

Varenummer: FC2010-50 Fe-Col Prøveoppsamler. eske 50 stk.



Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Med-Kjemi AS
Drengsrudbekken 9
1383 Asker

Postadresse:
Med-Kjemi AS
PB. 413
1373 Asker

Bestilling:
bestilling@med-kjemi.no

Spørsmål:
firmapost@med-kjemi.no

Hjemmesider:
www.med-kjemi.no